

## Instructions for Use

Rev. 01




Incorrect



Correct

Check the correct and incorrect side of lens  
Rinse it before wearing every time

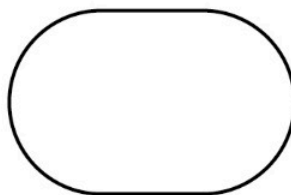

### Cómo colocar las lentillas:

- Lávese bien las manos.
- Coloque la lentilla en el dedo índice de la mano derecha.
- Abra bien el ojo: con el dedo medio de la mano izquierda levante el párpado superior y con el dedo medio de la mano derecha baje el párpado inferior.
- Coloque suavemente la lentilla sobre la pupila.
- Cierre el ojo suavemente para que la lentilla se centre y toque ligeramente el párpado.

### Cómo retirar las lentillas:

- Lávese bien las manos.
- Abra bien el ojo con los dedos.
- Retire la lentilla sujetándola con el pulgar y el dedo índice de la mano derecha.

### Recomendaciones de uso y mantenimiento:

- Aunque las lentillas permiten uso continuado, deben limpiarse diariamente.
- Se recomienda realizar una limpieza de proteínas al menos una vez cada dos semanas para mantener la frescura.
- Cambie la solución del estuche portalentillas cada día después de usarlo.
- Consulte a un profesional de la salud ocular en caso de enrojecimiento o dolor.

### Precauciones:

- No usar lentillas si padece alguna enfermedad ocular o alergia grave a lentes de contacto.
- Compruebe que no tiene ninguna enfermedad ocular o sistémica y siga las indicaciones de su oftalmólogo.
- No utilizar si el envase estéril está abierto o dañado.
- Guarde las lentillas en una solución conservadora adecuada.
- Utilice limpiadores, soluciones de enjuague o lubricantes compatibles con el material de la lentilla.
- Suspenda su uso y consulte a un oftalmólogo si siente dolor intenso o sensación de cuerpo extraño.
- Si su visión es inestable debido a sequedad en la superficie de la lentilla, use lágrimas artificiales o solución salina fisiológica y parpadee hasta recuperar la visión normal.
- Si sufre fatiga visual por exceso de trabajo, falta de sueño o lectura prolongada, deje de usar las lentillas y descanse.
- Utilice solo soluciones salinas, limpiadores o líquidos conservantes fabricados por empresas especializadas; nunca use agua del grifo ni productos caseros.
- Evite el contacto de las lentillas con jabón, champú, laca o cosméticos. Maquillarse después de colocarlas.
- No raye ni dañe las lentillas con las uñas.